

<b>품목허가번호</b>	수허 99-3138 호
<b>품목명</b>	와동이장재
<b>모델명</b>	제조사표시사항참조
<b>수입업자</b>	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7 층(문정동)
<b>제조원(제조국)</b>	DENTSPLY DeTrey GmbH (독일)
<b>사용목적</b>	민감성을 나타내는 노출된 Dentine Tubules 의 봉쇄, 동통완화
<b>중량 또는 포장단위</b>	4.5ml
<b>사용방법</b> 가. 사용 전 준비사항 와동 등의 치아표면을 Prophy-paste 등으로 깨끗이 소제한다. 나. 사용방법 Seal & Protect 를 적용 팁에 묻혀서 원하는 부위에 도포한 후 20 초 정도 가만히 둔다. 초과된 부분은 Cotton pellet 이나 부드러운 바람으로 제거한다. 광중합기로 10 초간 광중합한다. 2 차로 Seal & Protect 를 도포한 후 10 초간 광중합한다. 잉여부분을 제거한다. 다. 사용 후 보관 및 관리방법 밀봉하여 24°C 이하에서 보관한다. 화기에 주의한다.	
<b>사용 시 주의사항</b> 가. 사용할 때 주의사항 치과용으로 사용할 것 인화성 물질을 함유하므로 화기로부터 멀리할 것 눈이나 피부 등에 접촉하지 않도록 주의한다. 나. 유효기간 제조일로부터 18 개월 다. 저장방법 24°C 이하에서 차광보관한다. 환기가 양호한 곳에서 화기를 멀리할 것 라. 사용금지 레진 민감성 환자에게 사용금지	
<b>첨부분서의 작성 및 개정연월</b>	2021.05
<b>보관 또는 저장방법</b>	밀봉하여 24°C이하에서 통풍이 잘 되는 곳에서 화기에 주의하여 보관할 것
<b>유효기간</b>	제조일로부터 18 개월
<b>제조번호</b>	LOT 번호 참조

제조연월, 사용기한

제조사 표시사항 참조

본 제품은 의료기기임