

품목신고번호	서울수신 12-1083호
품목명	치과용연마제
모델명	제조사 표시사항 참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조원(제조국)	DENTSPLY Caulk (미국)
제조의뢰자(제조의뢰국)	DENTSPLY DeTrey GmbH (독일)
사용목적	치아 및 보철물의 연삭 및 연마에 사용되는 재료
중량 또는 포장단위	제조원의 포장단위에 의함
<b>사용방법</b> 1. 사용 전 준비사항 구강 내의 치아를 세척한다. 2. 사용방법 치과용 핸드피스에 폴리싱컵을 장착하고 적정량의 페이스트를 도포한 후 핸드피스의 회전력을 이용하여 착색을 제거한다. 3. 사용 후 보관 및 관리방법 -사용 후 반드시 마개를 닫아야 한다. -직사광선을 피하고 8~25°C 온도의 환기가 잘 되는 장소에서 보관한다. -습기가 없는 장소에서 보관한다. -냉동시키지 말아야 한다.	
<b>사용 시 주의사항</b> 1. 본 제품은 반드시 치과면허를 소지한 자만이 사용할 수 있다. 2. 사용하는 동안 보안경과 장갑을 착용해야 한다. 3. 유효기간이 경과한 제품은 사용하지 말아야 한다.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2021.05
보관 또는 저장방법	-사용 후 반드시 마개를 닫아야 한다. -직사광선을 피하고 8~25°C 온도의 환기가 잘 되는 장소에서 보관한다. -습기가 없는 장소에서 보관한다. -냉동시키지 말아야 한다.
유효기간	제조일로부터 3년
제조번호	LOT번호 참조
제조연월, 사용기한	제조사 표시사항 참조
<b>본 제품은 의료기기임</b>	