

품목신고번호	서울수신 12-1938호
품목명	치과용연마제
모델명	N850677 Neoloy Special Hard Model Dip
수입업자	덴츠플라이코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조원(제조국)	DENTSPLY Trubyte (미국)
사용목적	치아 및 보철물의 연삭 및 연마에 사용되는 재료
중량 또는 포장단위	EA
<b>사용방법</b> (1) 사용 전 준비사항 반드시 환기가 잘 되는 장소에서만 사용해야 한다. (2) 사용방법 전기 수조에 연마용액을 붓고 연마할 재료를 천천히 담근 후 전기 수조의 전원을 켜 후 표면 연마를 시작한다. (3) 사용 후 보관 및 관리방법 사용 후 남은 연마용액은 용기 뚜껑을 완전히 닫은 다음 환기가 잘 되는 장소에 차광 보관한다.	
<b>사용 시 주의사항</b> 연마 용액을 사용하기 전에 반드시 보호안경, 마스크, 보호장갑, 보호복을 착용해야 한다. 사용 후 남은 연마용액은 용기 뚜껑을 완전히 닫은 다음 통풍이 잘 되는 장소에 차광 보관한다. 눈에 접촉했을 경우, 충분한 양의 물로 씻고 의사의 진단을 받아야 한다. 반드시 환기가 잘 되는 장소에서만 사용해야 한다. 유효기간: 반영구	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2021.05
보관 또는 저장방법	통풍이 잘 되는 장소에 차광보관
제조번호	제조사 표시사항 참조
제조연월	제조사 표시사항 참조
<b>본 제품은 의료기기임</b>	