

**【품목명】**치과임플란트시술용스크루드라이버 (C21030,01, 1등급)

**【모델명】**제품 라벨 참조

**【품목신고번호】**수신17-1260호

**【사용목적】**임플란트 시술시 구성품들을 결합하는 과정에서 나사를 조이는 기구

**【사용방법】**

**가. 사용 전 준비사항**

- 시술에 필요한 제품의 구성과 시술기구들의 구비를 확인한다.
- 포장 및 제품의 손상 및 이상 유무를 확인한다.

**나. 사용방법**

- 1) 드라이버를 콘트라앵글에 체결한다.
- 2) 드라이버의 팁부분이 OsseoSpeed EV 임플란트의 홈(single position)에 맞춰지도록 천천히 돌린 후, 체결력에 맞춰 충분한 힘으로 누른다.
- 3) 낮은 속도(25rpm)에서 최대 45Ncm 토크로 회전시킨다.

**다. 사용 후 보관 및 관리방법**

○ 세척, 살균 및 멸균

- 1) 일반적인 방법 및 전용 워시트레이(Washtray GS ASTRA TECH Implant System EV)를 사용할 수 있다.
- 2) 일반적인 방법
  - 사용 후 미지근한 물(<40°C)에 담가 잔여조작이나 뼈 잔해들을 제거한다. 120분 이내에 세척하지 못할 경우 세척액이나 살균액에 담가 두어 이물질이 굳는 것을 막는다.
  - 세척을 위해 슬리브를 분리한다.
  - 적절한 세제 등을 사용하여 손으로 또는 치과 세척 살균기를 사용하여 세척 및 살균한다.  
(세부적인 사용법은 각 기기 및 공급자가 권장하는 사용법을 따른다.)
  - 검사: 끝이 무뎠거나 망가진 제품은 폐기한다.
  - 멸균: 부식을 방지하기 위해 완전히 건조시킨 후 고압증기멸균한다(134°C, 3분간).
  - 보관: 실온의 건조하고 먼지가 없는 장소에 보관
- 3) 전용 워시트레이(Washtray GS ASTRA TECH Implant System EV)
  - 제조원의 사용설명서에 따른다.
  - 보관: 실온의 건조하고 먼지가 없는 장소에 보관

■ 추가 세부적인 정보는 제조원 매뉴얼(Guided surgery manual)을 참조한다.

**【사용시 주의사항】**

1. ASTRA TECH Implant System EV는 적절한 교육 및 훈련을 거친 치과의사에 의해서만 사용 될 수 있다.
2. ASTRA TECH Implant System EV는 ASTRA TECH Implant System과 호환되지 않는다.
3. 시술 전, 미리 시술 계획에 따른 모든 기구와 장비를 철저히 준비한다.
4. 환자가 구성품을 흡입하거나 삼키지 않도록 주의해야 하며, 이를 예방하기 위한 조치를 취해야 한다.

**【보관 또는 저장방법】**실온보관

**【중량 또는 포장 단위】**1개

**【제조번호/제조연월】**제품 라벨 참조

**【수입판매원】**(주)유한양행 / 서울시 동작구 노량진로 74

**【제조회사】**Dentsply Implants Manufacturing GmbH

/ Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Germany

**【제조사】**Dentsply IH AB / Aminogatan 1, P0 Box 14, 43121 Molndal, Sweden