

**【품목명】**치과용임플란트시술기구 (C21010,01, 1등급)

**【모델명】**제품라벨 참조

**【품목신고번호】**서울 수신 07-486호

**【사용목적】**치과용 임플란트를 시술하는 데에 사용되는 기구

**【사용방법】**

■ 사용 전 준비사항

- 시술에 필요한 제품의 구성과 시술기구들의 구비를 확인하십시오.
- 포장 및 제품의 손상 및 이상 유무를 확인하십시오.

■ 사용방법

- 품목별로 제조원 매뉴얼의 안내사항에 따라 제시된 사용목적에 맞추어 사용하십시오.

■ 사용 후 보관 및 관리방법

- 세척, 살균 및 멸균
  - 각 제품은 사용 후 세척, 살균 및 멸균하십시오.
  - 사용 후 미지근한 물(<40℃)에 담가 잔여조작이나 뼈 잔해들을 제거한다. 120분 이내에 세척하지 못할 경우 세척액이나 살균액에 담가 두어 이물질이 굳는 것을 막아야합니다.
  - 적절한 세제 등을 사용하여 손으로 또는 전용기기를 사용하여 세척 및 살균하십시오. (세부적인 사용법은 각 기기 및 공급자가 권장하는 사용법을 따르십시오.)
  - 검사: 끝이 무더지거나 망가진 제품은 폐기하십시오.
  - 멸균: 부식을 방지하기 위해 완전히 건조시킨 후 제조원 지시에 따라 포장하여 고압증기멸균하십시오.(134℃, 3분간)

- 실온보관

※ 추가 세부적인 정보는 제조원 매뉴얼(Guided surgery manual)을 참조하십시오.

**【사용시 주의사항】**

• **사용할 때 주의 사항**

본 제품의 표면은 가능한 한 손으로 접촉하지 마시고, 접촉할 경우는 고무장갑을 끼고 전용공구 이외의 기구는 사용하지 마십시오.

• **보관조건 혹은 저장방법**: 실온 보관

**【보관 또는 저장방법】** 실온 보관

**【중량 또는 포장 단위】** 1개

**【제조번호/제조연월】** 제품라벨 참조

**【수입판매원】** (주)유한양행 / 서울시 동작구 노량진로 74

**【제조외리자】** Dentsply Implants Manufacturing GmbH

/ Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Germany

**【제조자】** Dentsply IH AB / Aminogatan 1, PO Box 14, 431 21 Molndal, Sweden