

**【품목명】**치과용임플란트시술기구

**【분류번호(등급)】**C21010.01 (1)

**【모델명】**제품 라벨 참조

**【품목신고번호】**수신 19-2446호

**【사용목적】**치과용 임플란트를 시술하는 데에 사용되는 기구

**【사용 전 준비사항】**

- 각 절차를 수행하기 전 필요한 모든 구성 요소, 장비 및 재료가 적절한 수량인지 확인하고 완벽하게 작동하는지 확인한다.
- 포장 및 제품의 손상 및 이상 유무를 확인한다.
- 비멸균 상태로 공급되며, 최초 사용 전 반드시 멸균한다.
- ISO 17665-1,2에 따라 스팀멸균한다.
- 세척 및 살균 및 멸균
  - 1) 제조원 매뉴얼에 따라 적절한 세제 등을 사용하여 세척 및 살균한다.
  - 2) 제조원 매뉴얼에 따라 적합한 멸균 파우치에 넣어 증기멸균한다.

방법	주기	온도	노출시간	건조시간
증기멸균	Dynamic air removal (prevacuum)	130°C (270°F) 135°C (275°F)	4분 3분	20분
증기멸균	Gravity displacement	121°C (250°F)	30분	20분

\*최소 노출시간 및 작동시간은 제품에 따라 다를 수 있다.

- 멸균한 기구를 먼지가 없는 건조한 장소에 상온 보관한다.

**【사용방법】**

- PickUp Technique with Transfer Copings
  - 1) TransferCap을 Transfer Coping 위에 체결하고 PickUp Guide pin을 Hex driver를 이용하여 장착한다.
  - 2) Transfer Coping 주변에 인상재를 주입하여 인상 채득을 실시한다.
  - 3) 인상이 완료되면 PickUp Guide pin을 풀어 인상 tray를 제거한다.

**【사용 후 보관 및 관리방법】**

- 일회용의료기기로 재사용 금지

**【사용시 주의사항】**

- 일반적 주의사항
  - 수술부위에 손상이 가지 않도록 드라이버를 다룰 때에는 무리한 힘이 가해지지 않도록 주의한다.
  - 안전을 위해 보호복을 착용한다.
  - 구성품 흡입의 위험이 최소화되도록 환자를 배치하고 사용되는 모든 구성품은 삼켜지지 않도록 주의한다.
- 경고
  - 사용 전 반드시 사용설명서를 숙지하십시오.
  - 시술기구는 일반적인 치과/외과 처치, 안전, 사고예방에 대한 일반적인 규칙에 따라 의도된 목적(정해진 용도)으로만 사용될 수 있습니다.
  - 적절한 교육 및 훈련, 시술계획 및 진단을 포함한 보철, 구강수술에 대한 충분한 증례를 가진 치과기공사/치과의사/의사에 의해서만 사용 될 수 있습니다.
  - DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH는 사용목적 이외 용도로의 사용으로 인한 손상에 대하여는 책임이 없습니다.

**【보관 또는 저장방법】** 상온 보관

**【중량 또는 포장 단위】** 1개

**【제조번호/제조연월】** 제품 라벨 참조

**【수입판매원】**(주)유한양행 / 서울시 동작구 노량진로 74

**【제조원】**Dentsply Implants Manufacturing GmbH

/ Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Germany

문안제정연월 2020/01